

## Deze handleiding wordt u aangeboden door:



### **Disclaimer**

Deze handleiding kan fouten bevatten. Er kunnen mogelijk versieverschillen bestaan tussen deze handleiding en uw apparaat of softwarepakket. U bent zelf verantwoordelijk voor wijzigingen die u aanbrengt in de apparatuur of software.

rdgKompagne is niet verantwoordelijk voor defecten die voortkomen uit door u aangebrachte wijzigingen. Als u niet zeker bent van uw handelen, adviseren wij u contact op te nemen met onze helpdesk.

Eventuele fouten in deze handleiding kunt u mailen aan [info@rdgkompagne.nl](mailto:info@rdgkompagne.nl).

**rdgKompagne Postbus 310 7500 AH Enschede**  
**Telefoon: +31 (0)88-0 310 310 Fax: +31 (0)88-0 310 300 Website: [www.rdgkompagne.nl](http://www.rdgkompagne.nl)**  
**E-mail: [info@rdgkompagne.nl](mailto:info@rdgkompagne.nl) Helpdesk: [helpdesk@rdgkompagne.nl](mailto:helpdesk@rdgkompagne.nl)**

## Naam apparaat

Funkey

## Versie

Versie 1.00

## Waarschuwingen

- Lees voor het gebruik eerst goed deze handleiding!
- Bij reparaties of wijzigingen door anderen dan RDG vervalt de aansprakelijkheid en garantie.
- De Funkey mag nooit rechtstreeks op een computer worden aangesloten!
- Te alle tijde dient voorkomen te worden dat het hulpmiddel nat wordt. Hierdoor kan blijvende beschadiging aan het hulpmiddel ontstaan.
- Bij twijfels over het aansluiten raadpleeg uw leverancier!


## Inleiding

De Funkey is geschikt voor gebruikers met beperkingen ten aanzien van fijnmotorische bewegingen.

De Funkey is een hulpmiddel dat kan worden toegepast bij bediening van diverse apparatuur. Voorbeelden hiervan zijn computers, communicatiehulpmiddelen, omgevingsbesturingshulpmiddelen, etc.

Het hulpmiddel bestaat uit een slagvaste kunststof behuizing voorzien van een robuuste digitale joystick en vier functieknoppen. Met de joystick kunnen vier richtingen worden gekozen, terwijl de knoppen als "vuurknop" dienen.

Als de Funkey wordt aangesloten op de Icon III dan zijn de functies van de knoppen als volgt:

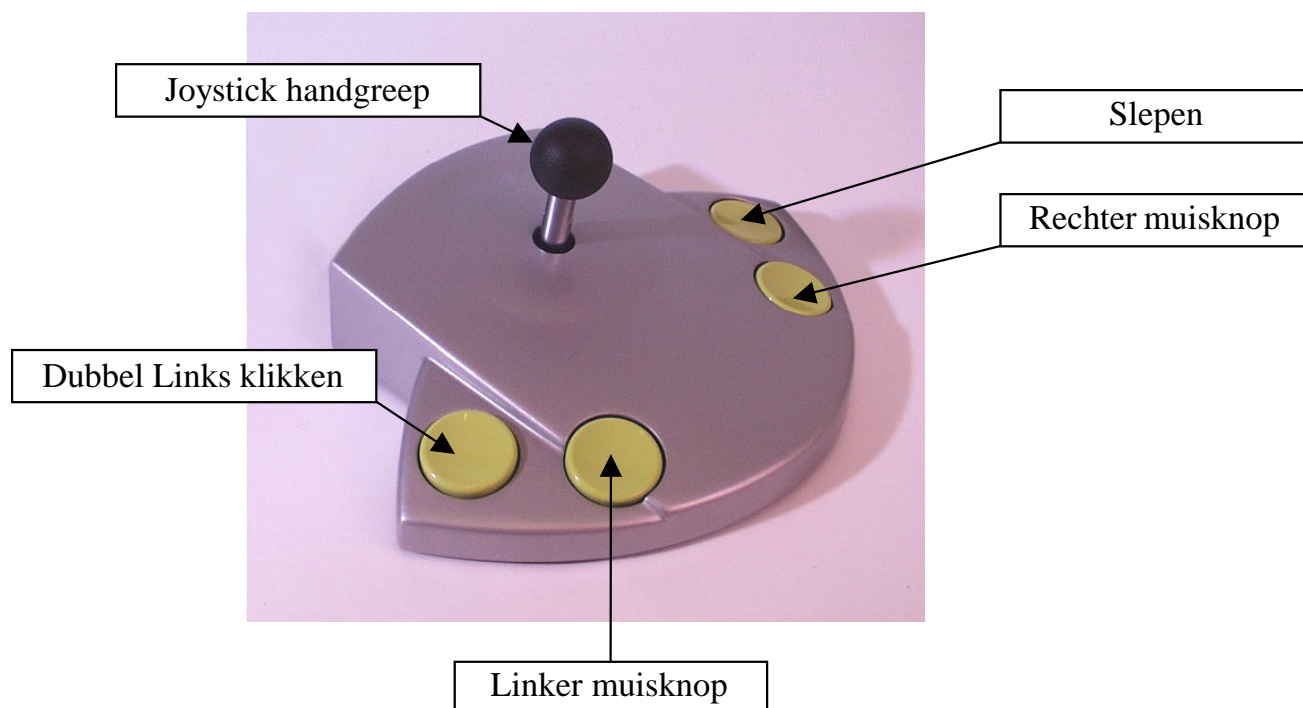

## Belangrijke informatie

De Zwarte handgreep op de joystick is te vervangen door een meegeleverde rode.

Tevens is het mogelijk de Funkey te voorzien van zuignappen aan de onderzijde. Deze kunnen bevestigd worden (met enige kracht) in de daarvoor bestemde gaten aan de onderzijde van de behuizing. Hierdoor is het mogelijk de Funkey te fixeren op een gladde vetvrije ondergrond.

Als bij gebruik blijkt dat herhaaldelijk de buitenste knoppen per abuis in gedrukt worden dan is het mogelijk deze knoppen te verlagen. Hiervoor dient u de bevestigingsschroeven (5 stuks!) met een daarvoor geschikte schroevendraaier los te draaien. Vervolgens moet u de bevestigingsmoertjes met een passende pijpsleutel (maat 5,5mm) losdraaien om vervolgens de buitenste functieknoppen los te draaien met de schroevendraaier. Nu kunt u de vulplaatjes tussen de knoppen verwijderen. Monteer alles weer in omgekeerde volgorde en bewaar de vulplaatjes zorgvuldig!

Vraag voor advies uw leverancier, of laat aanpassingen door de leverancier uitvoeren!

### **Gebruiksomgeving**

De Funkey is hoofdzakelijk bedoeld voor gebruik binnenshuis.

### **Gebruik**

Voor het uitproberen van de Funkey zal men eerst de gebruiksaanwijzing grondig moeten doorlezen.

Het wordt aangeraden om een deskundig persoon aanwezig te laten zijn die de werking kan uitleggen en kan assisteren bij de eerste kennismaking.

Alvorens de Funkey in combinatie met andere apparatuur dan de eigenlijke bestemming gebruikt gaat worden dient eerst contact te worden opgenomen met de leverancier.

De Funkey is voorzien van een negen polige D-connector. Deze is bedraad volgens de standaard rdgKompagne digitale joystick aansluiting.

### **PAS OP!**

***Rechtstreeks aansluiten van de Funkey op de seriële poort van een PC leidt tot defecten, hiervoor is altijd een interface nodig zoals bijvoorbeeld de Icon III muisemulator.***

De joystick is middels een kabel met connector verbonden met een hulpmiddel. Dit hulpmiddel dient te allen tijde voorzien te zijn van een dubbel-geïsoleerde

voeding om levensgevaarlijke situaties bij aanraking tijdens een defect aan het hulpmiddel te voorkomen.

### **Onderhoud**

Regelmatig reinigen verlengt de levensduur van het hulpmiddel. Aanbevolen wordt om gebruik te maken van een droge, eventueel licht bevochtigde doek.

Gebruik bij reiniging geen agressieve schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen, harde borstels, etc.

### **Wat wordt er standaard geleverd**

- 1x De Funkey
- 1x Tweede rode handgreep
- 1x 9 Pins Sub D kabel type: Male \_ Female 1,8 meter
  - Deze is in iedere vakhandel te verkrijgen voor eventuele vervanging!
- 4x Zuignappen
- Handleiding

***Bij problemen of vragen, raadpleeg eerst uw leverancier!***