

Deze handleiding wordt u aangeboden door:



Disclaimer

Deze handleiding kan fouten bevatten. Er kunnen mogelijk versieverschillen bestaan tussen deze handleiding en uw apparaat of softwarepakket. U bent zelf verantwoordelijk voor wijzigingen die u aanbrengt in de apparatuur of software.

rdgKompagne is niet verantwoordelijk voor defecten die voortkomen uit door u aangebrachte wijzigingen. Als u niet zeker bent van uw handelen, adviseren wij u contact op te nemen met onze helpdesk.

Eventuele fouten in deze handleiding kunt u mailen aan info@rdgkompagne.nl.

rdgKompagne Postbus 310 7500 AH Enschede
Telefoon: +31 (0)88-0 310 310 Fax: +31 (0)88-0 310 300 Website: www.rdgkompagne.nl
E-mail: info@rdgkompagne.nl Helpdesk: helpdesk@rdgkompagne.nl

Verkorte handleiding M3/M3max

Algemeen

Boven in het scherm staan 5 knoppen. Deze knoppen hebben de volgende functies:

- Bewerk-knop met microfoon → opnemen boodschap
- Bewerk-knop met sleutel → knop aanpassen/invullen
- Bewerk-knop met huis → verspringen naar startpagina
- Bewerk-knop met pijl → verspringen naar vorige pagina
- Blauwe knop met radertje → set-up knop

1. Oproepen/laten verdwijnen van 'bewerkknoppen'

- Kies de 'set-up knop'
- Kies 'programma instellingen'
- Kies tabblad 'titelbalk'
- Vink 'alleen set-up knop weergeven' aan of uit

2. Een nieuwe pagina maken

- Kies de 'set-up knop'
- Kies 'nieuwe pagina maken'
- Bepaal hoeveel knoppen (rijen en kolommen) de pagina moet bevatten. Kies verder de juiste lettergrootte, stijl knop etc. → ok
- Geef je pagina een duidelijke naam → ok
- Je komt automatisch in de net aangemaakte pagina

3. Een knop invullen (symbool, label en verwijzing naar andere pagina)

- Kies de 'bewerk-knop met sleutel' en kies vervolgens de knop die je wilt vullen
- Vul het label in, dit is het woord dat boven in de knop komt te staan
- Vaak wordt er automatisch een symbool gekozen, is dit niet het geval, kies dan 'symbool' en vul bij zoeken een alternatieve zoekterm in
- Kies het juiste symbool
- Verander eventueel de knopkleur of de stijl van de knop

Als er bij een druk op de knop naar een andere pagina gesprongen moet worden, voer dan de volgende stappen uit

- Bewerk-knop met sleutel
- Kies 'acties'
- Kies 'ga naar pagina'
- Kies 'voeg toe'
- Kies de pagina waarnaar je wilt springen → ok → ok → ok

Tip 1. De pagina met het grijze vak is de pagina waarin je momenteel een knop aan het bewerken bent. Deze pagina zal je nooit kiezen, want dan spring je naar de pagina waarin je al zit (de M3/M3max zal dan niets doen).

Tip 2. Je kunt niet naar een pagina verwijzen die er nog niet is. Maak daarom eerst de nieuwe pagina en daarna de knop met de verwijzing. Maak in een nieuwe pagina altijd eerst de terug-knop.

4. Geluid opnemen

- Plug de microfoon in de M3/M3max
- Kies de 'bewerk-knop met microfoon'
- Kies de knop waar je geluid bij wilt opnemen
- Kies 'opnemen' en spreek je tekst in, houd hierbij de 'opnemen-knop' ingedrukt
- Kies 'opslaan'

5. Een foto invoegen

- Zet de foto verkleind op de USB-stick van de M3/M3max (ongeveer 150 * 100 pixels, zie eventueel handleiding PIXresizer)
- Steek de USB-stick in de M3/M3max
- Kies de bewerk-knop met sleutel' en kies vervolgens de knop die je wilt vullen
- Kies 'symbool'
- Kies 'importeren'
- Vink 'alle mappen weergeven' aan
- Open links in het scherm de UMS FOLDER door op het plusje voor de folder te klikken (is de USB-stick). Ga links naar de map waarin de foto opgeslagen is
- Selecteer rechts de foto → ok → ok → ok

6. Pagina overzicht

In het pagina overzicht staan alle pagina's die in de M3/M3max staan. Via het pagina overzicht kun je een pagina opzoeken of een reeds bestaande pagina wijzigen

- Kies de 'set-up knop'
- Kies 'pagina overzicht'
- Selecteer de pagina die je wilt wijzigen of waar je naar toe wilt springen
- Kies respectievelijk 'pagina's wijzigen' of 'ga naar pagina'

Tip 3. De pagina die momenteel geopend staat, kan niet gewijzigd worden.

7. Het volume veranderen

- Kies de 'set-up knop'
- Kies 'geluidsinstellingen'
- Zet het volume hoger of lager

8. Instellen van een wachtwoord

Wanneer het niet gewenst is dat de gebruiker in de set-up instellingen kan komen, kan een wachtwoord aan de set-up knop gekoppeld worden.

- Kies de 'set-up knop'
- Kies 'programma instellingen'
- Kies tabblad 'geavanceerde instellingen'
- Vink 'wachtwoord aan' aan en voer 2 maal het wachtwoord in → ok

- Bij invoer time out kan het aantal seconde ingevuld worden waarna het toetsenbord automatisch zal verdwijnen, wanneer er geen of een foutief wachtwoord ingevuld wordt.

9. Instellingen van gekozen selectie methode

De M3/M3max kan met de hand bediend worden, maar tevens met één of twee knoppen. Dit kan veranderd worden bij de 'selectie methode'. Kies hiervoor eerst de 'set-up knop'. Vervolgens kan bij 'selectie instellingen' de M3/M3max optimaal ingesteld worden.

10. Een back up maken

Bij het maken van een back up wordt zowel het vocabulaire als alle instellingen van de M3/M3max opgeslagen. Maak daarom regelmatig een back up van de M3/M3max.

- Steek de USB-stick in de M3/M3max
- Kies de 'set-up knop'
- Kies 'back-up/upgrade'
- Kies 'M3 back up' → ok
- Wacht vervolgens af, dit zal even duren
- Vul bij 'naam' een passende naam in → ok
- De M3/M3max gaat nu een reservekopie maken, dit duurt lang
- Wanneer 'maken van back-up voltooid' in beeld verschijnt → ok. Het bestand is in de map 'Backup' opgeslagen

11. De back up terug zetten op de M3/M3max

- Steek de USB-stick in de M3/M3max
- Kies de 'set-up knop'
- Kies 'back-up/upgrade'
- Kies 'M3 herstellen' → ok
- Vink 'alle mappen weergeven' aan
- Open links in het scherm je UMS FOLDER (is de USB-stick) en ga links naar de map 'Backup'
- Kies rechts het meest recente back-up bestand → ok
- Wacht af totdat de M3/M3max de back up terug gezet heeft → ok

12. Een pakket van pagina's maken

Bij het maken van een back up wordt de gehele inhoud van de M3/M3max opgeslagen, dit kost vrij veel tijd. Het is ook mogelijk alleen het vocabulaire op te slaan. Dit heet 'een pakket van pagina's maken' en kost minder tijd.

- Steek de USB-stick in de M3/M3max
- Kies de 'set-up knop'
- Kies 'pagina overzicht'
- Selecteer in 'pagina overzicht' al de pagina's die je wilt opslaan (je kunt hiervoor 'alles selecteren' aanvinken)
- Kies 'bestanden uitwisselen'
- Kies 'pakket van pagina's maken'
- Vink 'alle mappen' aan

- Open links in het scherm je UMS FOLDER (is de USB-stick) en kies links de map 'Packages'. Hierin wordt het pakket van pagina's opgeslagen
- Voer een passende naam in
- De tekst 'maken van pakket geslaagd' verschijnt. De gekozen pagina's staan nu op de USB stick → ok

13. Een pakket van pagina's terug zetten op de M3/M3max

- Steek de USB-stick in de M3/M3max
- Kies de 'set-up knop'
- Kies 'pagina overzicht'
- Selecteer links de map waarin de pagina's terug gezet moeten worden
- Kies 'bestanden uitwisselen'
- Kies 'pakket importeren'
- Vink 'alle mappen weergeven' aan
- Kies links de UMS-FOLDER en vervolgens de map 'packages'
- Kies rechts het pakket van pagina's die je terug wilt zetten
- Vervolgens vraagt de M3/m3max 'Wilt u alle pagina's met reeds bestaande namen overschrijven?' Kies 'ja'
- Kies vervolgens 'ja op alles'
- Het vocabulaire met spraak staat nu in de gekozen map bij 'pagina overzicht'

14. Een visuele scène maken

- Verklein een liggende foto tot 800 x 600 pixels (is het maximale formaat dat de M3/M3max kan importeren)
- Kies de 'set-up knop'
- Kies 'nieuwe pagina maken'
- Kies 'visuele scène'
- Vink 'alle mappen weergeven' aan
- Open links in het scherm je UMS FOLDER (is de USB-stick) en ga links naar de map waarin de foto opgeslagen is
- Selecteer rechts de foto → ok
- Geef je pagina een duidelijke naam → ok

Je komt automatisch in de pagina met de visuele scène. Er staan 3 bewerk-knoppen in beeld. Deze knoppen verdwijnen als je de meest linker bewerk-knop kiest en komen in beeld wanneer je de 'bewerk-knop met sleutel' kiest. Vervolgens ga je vakken maken waaronder de geluidsopnames komen te staan. Het is hierbij handig als je de geluidsopname een naam kan geven. Dit doe je als volgt:

- Kies de 'set-up knop'
- Kies 'programma-instellingen'
- Kies tabblad 'geavanceerde instellingen'
- Vink 'opnamen zelf benoemen' aan → ok → ok
(naderhand kun je deze vink weghalen)
- Kies vervolgens de 'bewerk-knop met sleutel'
- Kies de middelste bewerk-knop (actief gebied selecteren/maken)

- Maak met je vinger een vak om een deel van de foto. Dit doe je door met je vinger van links boven naar rechts onder over het beeld te slepen. In het vak kun je een geluidsopname zetten
- Kies 'audiosignaal'
- Kies 'nieuw'
- Voer de naam van de geluidsopname in
- Kies 'opnemen' en spreek je tekst in, houd hierbij de 'opnemen-knop' ingedrukt
- Kies 'opslaan' → ok
- Kies 'selecteer acties'
- Kies 'opname afspelen'
- Kies 'voeg toe'
- Kies de zojuist opgenomen boodschap in het linker scherm → ok → ok → ok
- Kies de linker bewerk-knop en controleer je opname